

GUIA DO USUÁRIO

CABO DE EXTENSÃO REUTILIZÁVEL

Modelos:

SC-1000 - 1 Cabo de extensão reutilizável

Indicação de uso/ Finalidade:

Os cabos de extensão destinam-se ao uso com os eletrodos de pele e o Gerador de Radiofrequencia Pulsada.

Condições para armazenamento e transporte:

- Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar direta e de agentes corrosivos. A temperatura do local deve estar entre -10°C e +45°C, umidade 20% a 90% e pressão: 50kPa a 106kPa.
- Não coloque sob a embalagem pesos ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as características técnicas do produto e comprometer a integridade da embalagem;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada e deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.

Condições para operação:

- Deve ser utilizado apenas por profissionais qualificados, habilitados e treinados.
- Evite qualquer tipo de ação que possa danificar o produto, tais como queda, torção, impacto ou esmagamento, devido ao risco de comprometimento de seu funcionamento.

Advertências/ Precauções:

- Leia atentamente todas as instruções antes de usar, incluindo as instruções para eletrodos e gerador em uso.
- Observe todas as contra-indicações, advertências e precauções indicadas nestas instruções.
- Não modifique este produto de forma alguma.
- O não cumprimento adequado das instruções pode levar ao funcionamento inadequado do dispositivo e resultar em lesões ao paciente.
- Inspeccione todos os componentes quanto a danos antes de cada uso. Se os componentes estiverem danificados de alguma forma, eles não devem ser usados.
- Componentes danificados devem ser descartados ou devolvidos para avaliação/reparo.
- Componentes danificados podem resultar em lesões no paciente ou no operador.

Contraindicações:

- Não foram encontradas contra-indicações para o uso do produto.

Limpeza/cuidado e manutenção:

- Proteção do pessoal: O pessoal deve usar luvas de proteção, que atendam aos padrões da Diretiva CEE 89/686, ao manusear o cabo.
- Pré-tratamento: Remova as principais impurezas do cabo imediatamente após o uso antes de continuar a tratá-las individualmente ou em um sistema de caixa/bandeja.
- Em geral:

Cuidado: Nunca mergulhe nenhum conector em qualquer líquido.

Limpeza à mão:

Procedimento de limpeza:

1. Desmonte o cabo sempre que possível para garantir limpeza e descontaminação adequadas.
2. Inspeccione visualmente as peças novamente em busca de detritos; se houver algum, repita o procedimento acima começando no nº 1.
3. Certifique-se de que o cabo esteja devidamente limpo.
4. Seque as superfícies com uma toalha limpa, macia e sem fiapos.
5. Enrole o cabo.

• Verificação: Após os procedimentos de limpeza e desinfecção, verifique se os cabos não apresentam sinais de corrosão, superfícies danificadas ou impurezas.

Cabos danificados não devem ser usados novamente.

• Resistência material: É proibida a utilização de detergentes ou desinfetantes que contenham as seguintes substâncias: álcalis fortes (>pH9), ácidos potentes (>pH4), fenóis ou iodóforos, combinações de compostos halogéneos/hidrocarbonetos halogenados/iodóforos, produtos/peróxidos fortemente oxidantes.

Instrução de uso:

- Conecte o cabo de conexão ao Gerador de Radiofrequencia. Tenha cuidado para alinhar o indicador de conexão do gerador com o do cabo.
- Conecte o eletrodo de pele ao cabo de conexão.
- Verifique se os parâmetros de saída estão dentro de valores razoáveis.
- Siga as instruções de operação do Gerador.

Segurança e Eficácia do Produto:

Produto totalmente seguro se utilizado por profissional habilitado e respeitando as especificações de uso descritas neste documento; O não cumprimento dessas instruções causa o uso incorreto do dispositivo, configurando mau uso e potencializando os riscos para o paciente; Em caso de dúvidas ou problemas, consulte sempre a SOLLIEVO.

Símbolos utilizados:



Cuidado



Data de fabricação



Lote



Fabricante



Mantenha longe da luz solar



Conservar em local seco / Longe de umidade.



Risco Biológico



Limites de temperatura máxima e mínima de armazenamento.

Registro ANVISA: 81022030036

Fabricante: Shenzhen Keborui Electronics Co.,Ltd
2F Building B, Xinhuatong Ind. Park, Shiyan town, Bao'an
District, Shenzhen, P.R. China 518108

Detentor da Notificação: Sollievo Medicina Especializada
Ltda - Rua Alegre, 470 conj 406 e 1303 - Santa Paula - São
Caetano do Sul - SP - CEP 09550-250

Contato: 4226-3234